

Tristel Duo™

OPH

POUR LES LENTILLES
DE DIAGNOSTIC



Mousse de désinfection de haut niveau

Notes:

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Désinfecter les mains et porter l'équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Retirer et jeter les arrêts empêchant la pompe de se dépressuriser pendant le transport.
- Si Tristel Duo OPH est utilisé pour la première fois, appuyer sur la pompe deux à quatre fois pour l'amorcer.
- Si la surface est visiblement sale, suivre les consignes de nettoyage du protocole de l'hôpital.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.
- La date de péremption ne change pas, lors de l'utilisation du flacon.

ÉTAPE 1



Appliquer deux aliquotes de Tristel Duo sur une lingette sèche (de préférence Duo Wipes) ou directement sur l'instrument.

ÉTAPE 2



Essuyer l'appareil complètement en s'assurant que toute la surface soit recouverte par la mousse. L'essuyage continu de la surface n'est pas nécessaire et est même à éviter afin que la lingette ne s'effrite pas.


Note: Jeter la lingette utilisée conformément aux consignes locales. Ne pas jeter dans un macérateur. Ne pas réutiliser.

ÉTAPE 3



Laisser sécher le produit sur la surface pendant au moins **30 secondes**.

ÉTAPE 4

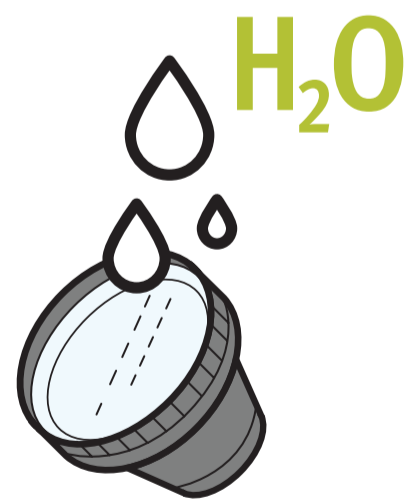

Rincer avec de l'eau bactériologiquement contrôlée ou stérile.

Note: Sauvegarder le dispositif médical conformément les protocoles de l'hôpital, afin d'éviter endommagement ou récontamination.

Tristel™

Établi par: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Suisse: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell - T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com
Belgique et Grand-Duché Luxembourg: Tristel SA, Anvers, Belgique - T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com
France: Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille - T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com

Informations sur les brevets sous : <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-075-5
February 2019