



# Tristel Duo™ ULT

## L'échographie sur le lieu des soins (POCUS – Point of Care Ultrasound) s'effectue dans un certain nombre de domaines et à des fins diverses.

L'échographie sur le lieu des soins (POCUS) est de plus en plus pratiquée pour des procédures invasives autant que non-invasives. Des sondes d'échographie sont utilisées pour aider à la mise en place de cathéters veineux centraux (CVC), pour guider l'insertion de cathéters centraux insérés par voie périphérique (PICC), pour des blocs anesthésiques et des contractions auriculaires prématurées (PAC), ainsi que pour des interventions musculosquelettiques.

### LÉGER - SIMPLE - EFFICACE

Tristel Duo ULT est une mousse à base de dioxyde de chlore, adaptée à la désinfection des sondes d'échographie pour surfaces cutanées utilisées lors de procédures l'échographie sur le lieu des soins (POCUS). Grâce à son format et sa simplicité, Tristel Duo ULT est facile à mettre en œuvre dans une grande variété de domaines où l'on utilise l'échographie sur le lieu des soins (POCUS).

Ces domaines incluent:

- Services d'urgence
- Soins intensifs
- Échographie portable
- Oncologie
- Radiologie
- Kinésithérapie
- en hôpital général
- Dialyse

Tristel Duo ULT porte le marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIb conformément à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et les modifications 2007/47/CE y afférentes. Duo Wipes est un dispositif médical de classe I conformément au règlement de l'UE relatif aux dispositifs médicaux (RMD 2017/745).


# TRISTEL DUO ULT EST SIMPLE D'UTILISATION: APPLIQUEZ, ÉTALEZ ET ATTENDEZ!



**1**  
APPLIQUER TRISTEL DUO ULT  
SUR UNE LINGETTE SÈCHE.  
De préférence une lingette Duo Wipes



**2**  
ÉTALER LA MOUSSE SUR LA  
SURFACE ET S'ASSURER  
QUE TOUTES LES ZONES  
SONT MOUILLÉES.

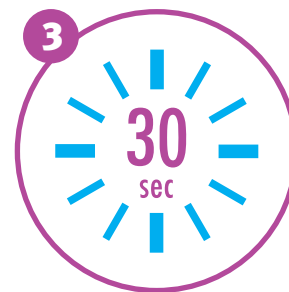

**3**  
RESPECTEZ UN TEMPS DE  
CONTACT DE 30 SECONDES ET  
LAISSEZ SÉCHER À L'AIR LIBRE.



## EFFICACE

Tristel Duo ULT est sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide, bactéricide et détruit l'ADN et l'ARN en 30 secondes de temps de contact. Il a été largement testé selon les dernières exigences des normes européennes et est conforme à la norme EN 14885:2018. Tristel Duo ULT est efficace contre les micro-organismes préoccupants tels que:

- *Bacillus subtilis*
- *Bacillus cereus*
- *Candida albicans*
- *Staphylococcus aureus*
- *Escherichia coli*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM)
- Entérobactéries résistantes aux carbapénèmes (ERC) *Klebsiella pneumoniae*
- Entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) *Enterococcus faecium*
- **Papillomavirus humain (HPV)**
- Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
- L'hépatite B
- Virus herpès simplex de type 1



## COMPATIBLE

Tristel Duo ULT a été testé et sa compatibilité a été confirmée par les principaux fabricants, notamment:

- Alpinion Medical
- Bard
- BK Ultrasound
- Butterfly Network
- Canon (Toshiba)
- Carestream
- Esaote
- Fujifilm Sonosite
- GE Healthcare
- Healerion Systems
- Hitachi
- Mindray
- Philips
- Quantel Medical
- Samsung
- SonoScape Medical Corp
- SuperSonic
- Imagine
- Verathon

## Les lingettes Duo sont conçues spécifiquement pour l'application de Tristel Duo ULT.

Les Duo Wipes sont composées de 100% polypropylène non tissé, à faible peluchage (18gsm) et sont prédécoupées pour éviter tout effilochage à partir du distributeur.

L'utilisation de Duo Wipes permet d'étaler efficacement le désinfectant pour qu'il agisse sur la surface.



### DUO WIPES

- 200 lingettes par boîte / 6 boîtes par carton

### TRISTEL DUO ULT

- 125ml de solution de base Tristel (acide citrique) + 125ml de solution d'activateur Tristel (chlorite de sodium).

La composition de dioxyde de chlore brevetée par Tristel est produite par mélange de ces deux solutions sur simple pression de la pompe à mousse.

- 310 doses par flacon / 6 flacons par carton

### DUO DOK

- Conçu pour garder Tristel Duo ULT à portée de main.
- 5 par pack.

**Tristel**<sup>TM</sup>  
WE HAVE CHEMISTRY.

Établi par: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

France: Tristel Sas, Boulevard de la Liberté, Lille 59000  
T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com

Belgique: Tristel NV, Smallandlaan 14B, 2660 Anvers  
T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Informations sur les brevets sous: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions  
MKI-B0-1328-1  
August 2020

Page 2 of 2