



LA SOLUTION COMPLÈTE POUR LES DISPOSITIFS D'ÉCHOGRAPHIE

Cette solution complète est conçue pour être conforme aux dernières exigences normatives publiées par la SF2H (Société Française d'Hygiène Hospitalière). La SF2H recommande une phase de nettoyage suivie d'une phase de désinfection. Chaque solution contient:

Tristel Clean

Des salissures importantes peuvent réduire l'efficacité. Par conséquent, un nettoyage en profondeur est une étape essentielle dans le processus de décontamination. Tristel Clean est une mousse tri-enzymatique conçue spécifiquement pour les sondes d'échographie endocavitaires et cutanées.


Tristel Duo ULT

Tristel Duo ULT est une mousse désinfectante de haut niveau à base de dioxyde de chlore, dont l'efficacité a été prouvée en 30 secondes de contact. Tristel Duo ULT est conçu spécifiquement pour les sondes d'échographie endocavitaires et cutanées.

Duo Wipes


Les lingettes Duo Wipes sont fabriquées à 100% en polypropylène non tissé à faible peluchage (18 g/m²) et prédécoupées pour éviter toute détérioration lorsqu'elles sont extraites du distributeur. L'utilisation de Duo Wipes permet d'appliquer efficacement à la fois Tristel Clean et Tristel Duo ULT sur la surface de la sonde.

Lors de l'utilisation de Tristel Clean pour le nettoyage et de Tristel Duo ULT pour la désinfection de haut niveau, aucun rinçage intermédiaire n'est nécessaire entre les deux opérations.

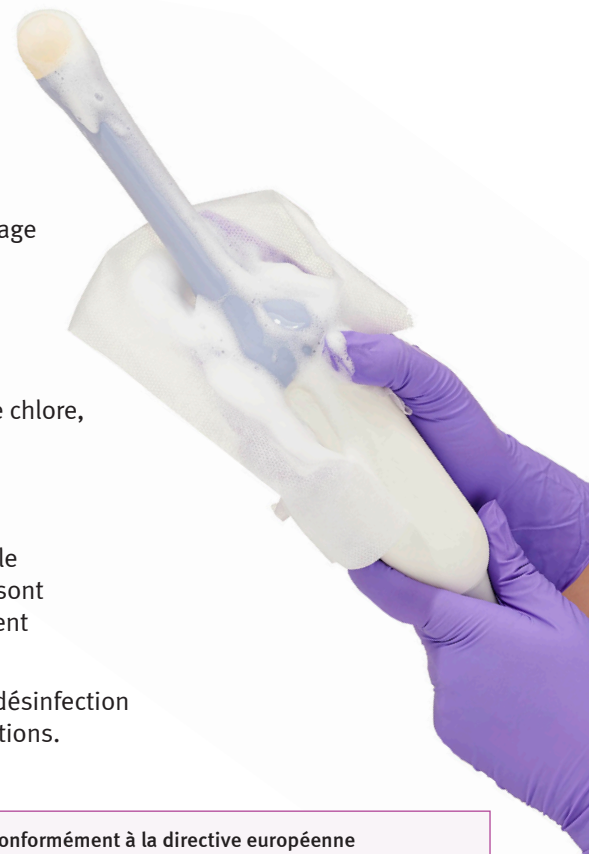


Le désinfectant Tristel Duo ULT porte le marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIb conformément à la directive européenne (93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et à ses amendements proposés dans la directive 2007/47/CE). Tristel Clean est un dispositif médical de classe I conformément au règlement de l'UE relatif aux dispositifs médicaux (MDR 2017/745). Les lingettes Duo sont un dispositif médical de classe I conformément au règlement de l'UE relatif aux dispositifs médicaux (MDR 2017/745).

COMMENT UTILISER CETTE SOLUTION POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

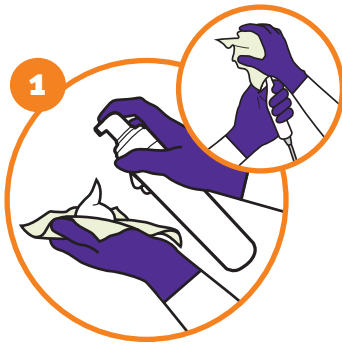


1 APPLIQUER TRISTEL CLEAN SUR UNE LINGETTE SÈCHE ET ÉTALER LA MOUSSE SUR LA SURFACE. S'ASSURER QUE TOUTES LES ZONES SONT HUMIDES ET QUE TOUTES LES SALISSURES VISIBLES SONT ENLEVÉES.

Les lingettes Duo Wipes sont recommandées.

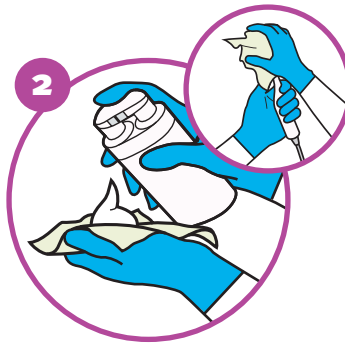

2 APPLIQUER DEUX DOSES DE TRISTEL DUO ULT SUR UNE LINGETTE SÈCHE. ÉTALER LA MOUSSE SUR LA SURFACE ET S'ASSURER QUE TOUTES LES ZONES SONT HUMIDES.

Les lingettes Duo Wipes sont recommandées.

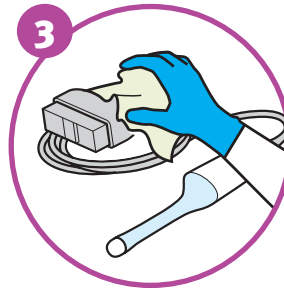

3 UTILISER TRISTEL DUO ULT POUR LA DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU DES SURFACES QUI PEUVENT ENTRER EN CONTACT AVEC LA SONDE, COMME LA FICHE, LE SUPPORT ET LE CÂBLE.



4 LA SURFACE DOIT RESTER HUMIDE PENDANT 30 SECONDES. LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE.

CONFORME

Conforme aux plus récentes exigences de SF2H 2019 et aux normes européennes applicables (à savoir EN 14885:2018)

COMPATIBLE

Testé et confirmé comme étant compatible avec les principaux fabricants

EFFICACE

Tristel Duo ULT est sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide et bactéricide

MOBILE

Peut être utilisé partout où il est nécessaire, sans les limitations associées aux systèmes automatisés

RAPIDE

Tristel Duo ULT est efficace en un temps de contact de seulement 30 secondes

PRATIQUE

La formation peut être suivie via le portail de formation en ligne Tristel, à votre convenance



TRISTEL DUO ULT

DÉTRUIT LE HPV SUR DE VRAIS DISPOSITIFS MÉDICAUX*

POUR EN SAVOIR PLUS: BIT.LY/HPVMEYERS

*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-con-taminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jimv.25666.

DUO WIPES

- 200 lingettes par boîte

TRISTEL CLEAN

- 310 aliquotes par flacon



TRISTEL DUO ULT

- 125ml de solution de base Tristel (acide critique) + 125 ml de solution d'activateur Tristel (chlorite de sodium)

Lorsque le mélange est effectué en appuyant sur la pompe doseuse, cela génère une mousse composée de la chimie exclusive de Tristel, le dioxyde de chlore

- 310 aliquotes par flacon

DUO DOK

- Support conçu pour garder Tristel Duo ULT à portée de main

Tristel[™]
WE HAVE CHEMISTRY.

Établi par: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E email@tristel.com - W www.tristel.com

France: Tristel Sas, Boulevard de la Liberté, Lille 59000
T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com

Belgique: Tristel NV, Smallandlaan 14B, 2660 Anvers
T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Informations sur les brevets sous: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Bro-1367-1
September 2020

Page 2 de 2